

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

RF BODY SHAPE è un prodotto innovativo destinato ad ottenere:

- Ringiovanimento della pelle
- Rimodellamento del corpo
- Lifting
- Significativo Miglioramento della Cellulite

TECNOLOGIA INNOVATIVA A RADIOFREQUENZA PER SCOLPIRE IL CORPO:

- **Quadro-Polar RF:** possibilità di lavorare in modo mirato e profondo su superfici ampie.
- **Bi Polar RF:** possibilità di lavorare su aree piccole e delicate.
- **Sensori di temperatura:** monitoraggio continuo della temperatura della pelle per assicurare efficacia e assenza di problemi durante i trattamenti.
- **Patient's Bio-Feedback:** permette al cliente di fermare il trattamento in caso di disagio.
- **Alta potenza** a 250 Watt permette un intenso trattamento con i migliori risultati possibili.



Risultati sorprendenti
Prezzo Competitivo!



RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

Active ha creato RF Body Shape un vero dispositivo a Radiofrequenza a 250 Watt frazionati, che monitorizza in modo continuo la temperatura della pelle e si adatta ad essa senza avere un sistema integrato di raffreddamento. Offre risultati magnifici ad un prezzo competitivo.

RenovActive by Active Optical System Ltd è orgogliosa di presentare l'innovativa Radiofrequenza RF Body Shape per:

- RINGIOVANIMENTO DELLA PELLE
- LIFTING VISO
- RIMODELLAMENTO DEL CORPO
- SPECIFICO CELLULITE

INTRODUZIONE:

Il rimodellamento del corpo è un business in crescita nei trattamenti estetici e medicali e la Radiofrequenza è una tecnologia riconosciuta nei trattamenti cosmetici ed è scelta perché:

1. È l'unica tecnologia capace di generare calore nello strato profondo della pelle (sottocutaneo) mentre la superficie rimane sufficientemente fredda e ben protetta.
2. È una tecnica non invasiva senza effetti collaterali.

L'emissione di energia di Radiofrequenza provoca:

1. Denaturazione e Contrazione delle Fibre di Collagene (questo produce un effetto lifting e compattamento della pelle e stimola la produzione di nuovo collagene e riduce il volume delle cellule sebacee).
2. Rottura delle Molecole del Grasso.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA:

L'efficacia del trattamento dipende dalla capacità della Radiofrequenza di far aumentare la temperatura negli strati più profondi della pelle. L'unico modo che indica che la temperatura è stata raggiunta è misurando la temperatura della pelle nell'area trattata.

RenovActive by Active Optical System ha fatto un grande passo avanti rispetto le altre Radiofrequenze presenti sul mercato, integrando nel Manipolo un veloce e innovativo strumento di misurazione della temperatura.

STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA:

Il congegno per misurare la temperatura, integrato nel Manipolo, è unico ed altamente preciso, un Infra-Rosso che legge la temperatura ogni decimo di secondo. Vantaggi:

1. **SICUREZZA.** E' possibile mantenere l'accumulo di calore ottenuto senza causare bruciate.
2. **EFFICIENZA.** Indicazione esatta di quando spostarsi nella zona successiva.
3. **EFFICACIA.** L'obiettivo è far arrivare al tessuto l'energia ottimale, per ottenere i risultati desiderati.

Ogni persona ha una pelle diversa e una differente resistenza del corpo (Impedenza), per questo motivo il generatore di radiofrequenza si modifica automaticamente, adattando l'emissione di energia ad ogni singolo individuo, rendendo così ogni trattamento efficace. **RF Body-Shape** misura e calcola l'impedenza della pelle e adatta il flusso di energia.

L'emissione di RF non è continuo e costante ma può variare a seconda:

1. L'impedenza locale della pelle.
2. Mancanza di contatto tra gli elettrodi metallici e la pelle.
3. Interferenze magnetiche.

RenovActive by Active ha integrato un microprocessore che misura ogni impulso di radiofrequenza regolando e assorbendo le punte energetiche secondo un livello predefinito. Quando un elettrodo metallico si avvicina alla pelle, si sviluppa una sovratensione in un piccolo spazio, tra l'elettrodo e la pelle (fino a che l'elettrodo tocca la pelle).

Vantaggi:

1. **CONFORT E SICUREZZA.**
2. **EFFICACIA.**
3. **RISULTATI.**

CSCS SISTEMA COMPUTERIZZATO DI CONTROLLO

CSCS è un sistema computerizzato di controllo **by Active** che monitorizza continuamente il flusso erogato di energia. Misura ogni impulso di Radiofrequenza e taglia i picchi di energia indesiderata, responsabili sia del dolore che di eventuali bruciate, causate con altre apparecchiature a radiofrequenza. Il sistema **CSCS** integrato nel **RF Body Shape**, garantisce così un flusso uniforme, continuo e senza picchi, per trattamenti sicuri e indolori.

MANIPOLO QUADRIPOLORE

La tecnologia Israeliana del **RF Body Shape** vanta un manipolo corpo Quadripolare con 4 elettrodi che si attivano simultaneamente, accumulando energia. Questo accumulo si traduce in una penetrazione più profonda nei tessuti.


Questo innovativo manipolo è leggero e maneggevole e permette all'operatore di eseguire senza problemi anche lunghi trattamenti su ampie aree.

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

CSCS-Computerized Spike Control System

CSCS - monitorizza in modo uniforme il flusso di energia misurando ogni impulso RF e tagliando i picchi di energia erogata indesiderata. Questo sistema computerizzato garantisce trattamenti sicuri e indolori, adatta un'immissione ottimale di energia controllata regolandosi sull'impedenza della pelle di ogni singolo individuo.

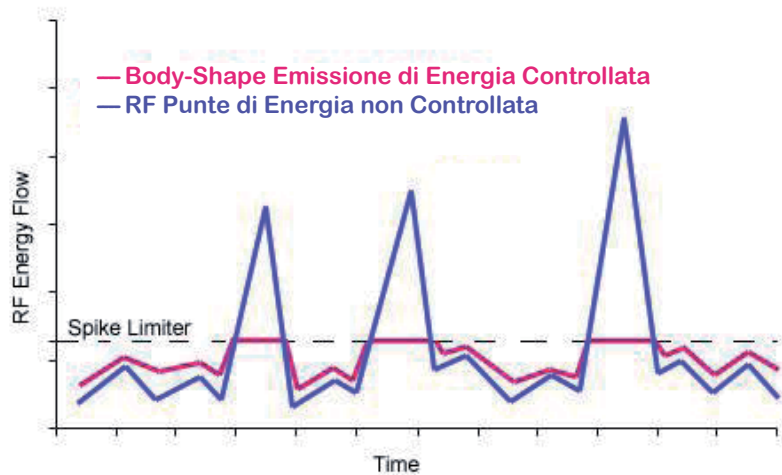

Prima



Dopo 3 trattamenti



Prima





Dopo 3 trattamenti



RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

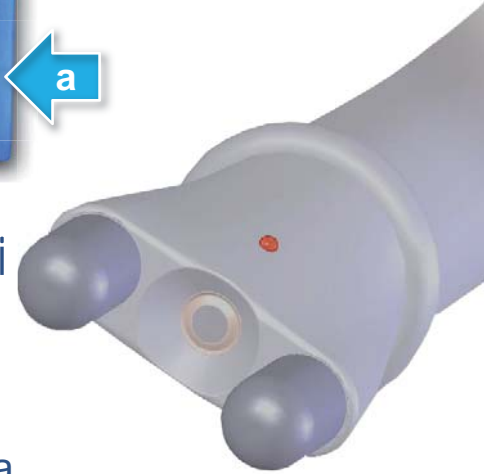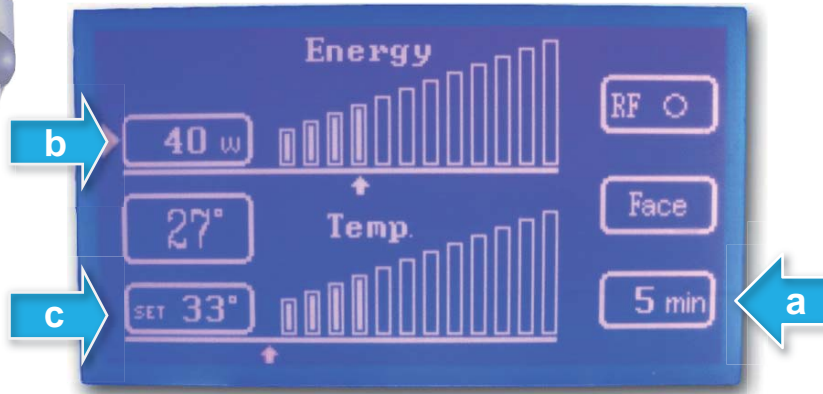


3 semplici passi operativi

- imposta il tempo di durata
- imposta l'energia raccomandata
- imposta la temperatura consigliata

Depressione delle Fibre di Collagene con ridotto sostegno

Ruga visibile

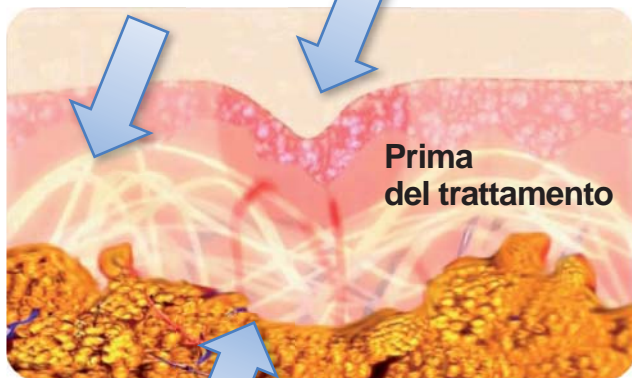


Prima del trattamento

Eccessivo strato di cellule adipose ingrossate

Riallineamento di Nuove Fibre di Collagene

Ruga trattata

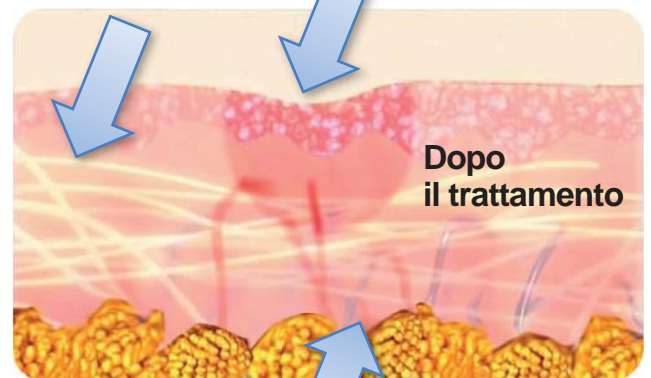

Dopo il trattamento


Normale tessuto adiposo

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

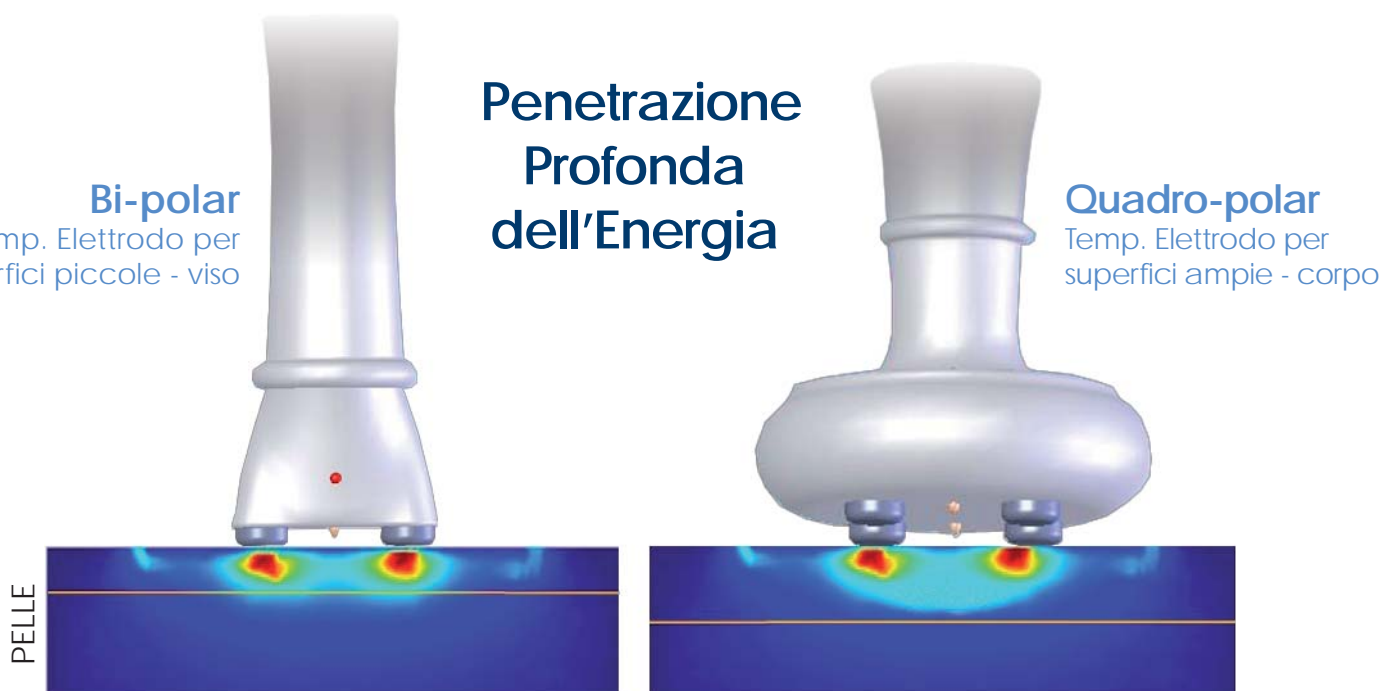

**Penetrazione
Profonda
dell'Energia**

Bi-polar

Temp. Elettrodo per
superfici piccole - viso

Quadro-polar

Temp. Elettrodo per
superfici ampie - corpo

Immagine termica dell'assorbimento del calore dalla pelle



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO

Massima tensione in uscita	250 Watt
Frequenza	6,8 MHZ
Elettrodi	Corpo Quadripolare Viso Bipolare
Sensori di temperatura	4 sensori per elettrodo corpo 2 sensori per elettrodo viso
Stop di emergenza	Pulsante di emergenza
Rete di alimentazione	220-230 Vac 50/60 HZ 100-120 Vac 50/60 Hz
Massima potenza assorbita	600 Va

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

Facial Skin Lifting*



Prima del Trattamento



Dopo 1 Trattamento



Prima del Trattamento



Dopo 2 Trattamenti

*Facial skin lifting = lifting della pelle del viso

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

Skin Tightening*



Prima del Trattamento



Dopo 1 Trattamento



Dopo 2 Trattamenti



Dopo 5 Trattamenti

*Skin Tightening = miglioramento dell'elasticità della compattezza e colorazione della pelle

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

Skin Tightening*



*Skin Tightening = miglioramento dell'elasticità della compattezza e colorazione della pelle

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

Cellulite Reduction*



*Cellulite Reduction = Riduzione della Cellulite

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com

RF Body Shape

Metodo sicuro per il rimodellamento

*Body Contouring

Ragazzo con by pass gastrico in dieta



*Body Contouring = Rimodellamento

RenovActive by NI.CA di Melesi Nicoletta s.r.l.

Via San Bernardino da Siena, 2/a - 22100 Como Tel. +39 031 5001725 Fax +39 031 589119 Mob. +39 348 3132257
e-mail: contact@renovactive.com - www.renovactive.com